



ADVANCED TISSUE-MANAGEMENT

The easy way to aesthetics.

PARASORB®HD Cone

GENTA-COLL®HD Cone



ESTRAZIONE DENTALE – PROBLEMA

Dopo un'estrazione la guarigione dell'alveolo senza cure particolari non è sempre ottimale. Da ciò ne consegue che:

- ▶ Il tessuto osseo necessario per un sicuro inserimento di un impianto si riforma solo in misura insufficiente.
- ▶ La cresta alveolare comincia a ritrarsi subito dopo l'estrazione. Occorre, dunque, ricostruire la cresta alveolare in previsione del successivo inserimento di un impianto.
- ▶ Tutte le procedure richiedono trattamenti impegnativi in tempo e costi, dolorose per il paziente e non del tutto prive di rischi.

La soluzione "4 in 1" di RESORBA®

1. Emostasi rapida e sicura

- ▶ nessun pericolo di emorragie successive
- ▶ stabilizzazione del coagulo
- ▶ con protezione antibiotica opzionale per pazienti a rischio (es: fumatori, diabetici, immunosoppressi)

3. Rigenerazione ossea affidabile

- ▶ matrice rigenerativa definita
- ▶ proprietà angio ed osteoconduttive
- ▶ dopo un tempo relativamente breve, formazione di uno supporto osseo stabile per l'impianto
- ▶ successo funzionale ed estetico a lungo termine predicibile


2. Riduzione dell'atrofia della cresta alveolare

- ▶ stabilizzazione degli alveoli e quindi mantenimento delle lamelle vestibolari sensibili
- ▶ stabilità di volume nel processo alveolare
- ▶ miglioramento dei risultati estetici e funzionali a lungo termine

4. Alto livello di soddisfazione dell'utilizzatore e del paziente

- ▶ applicazione estremamente semplice e sicura
- ▶ le fasi successive del trattamento risultano semplificate
- ▶ elevato comfort per il paziente
- ▶ ottimo rapporto qualità/prezzo

La differenza:
PARASORB® HD Cone / GENTA-COLL® HD Cone

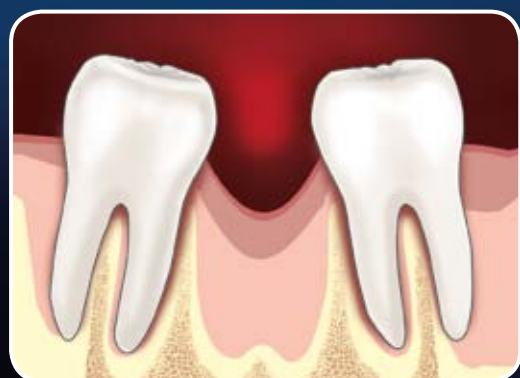

Raffigurazione schematica delle fasi di guarigione dopo l'estrazione:




A sinistra:
alveolo non curato

A destra:
alveolo curato con i coni dentali RESORBA®




Esperienze con i coni dentali RESORBA®

Da molti anni, in odontoiatria e chirurgia maxillo-faciale è usuale l'impiego di prodotti in collagene per ricostruire e mantenere la sostanza ossea. Centinaia di migliaia di coni dentali RESORBA® già impiegati in tal senso ne confermano l'efficacia e l'affidabilità. Lo stesso vale per gli altri prodotti dentali di RESORBA®, quali le spugnette PARASORB® e GENTA-COLL *resorb*® MKG ed il materiale per suture RESORBA®.




Impiego dei coni dentali RESORBA® nelle estrazioni

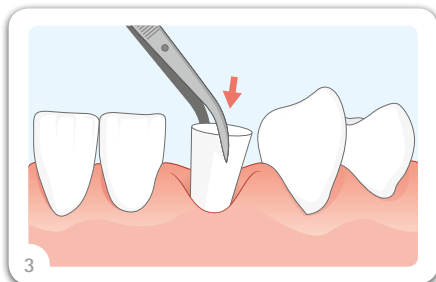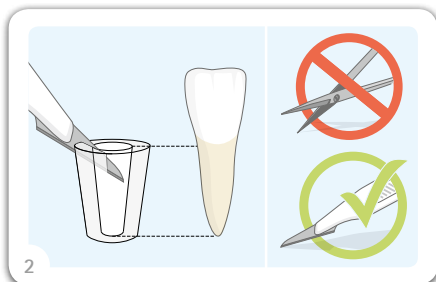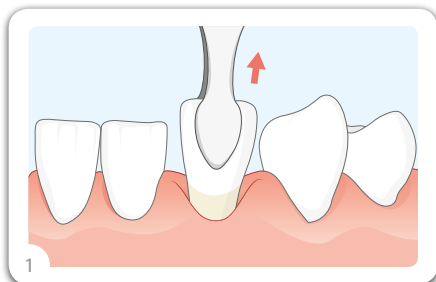

Impiego dei coni dentali RESORBA® nelle cistectomie

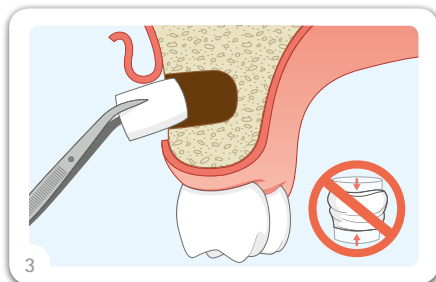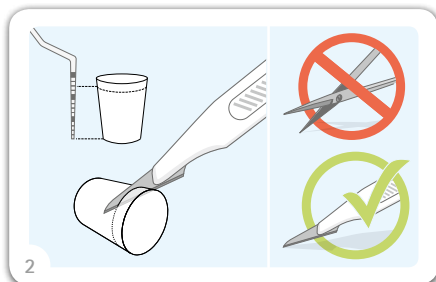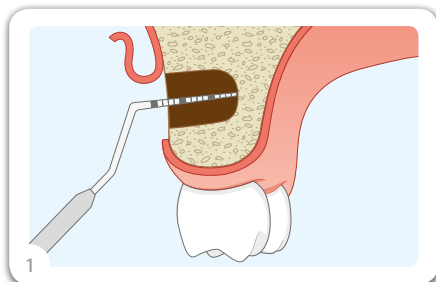

Impiego dei coni dentali RESORBA® nelle apicectomie

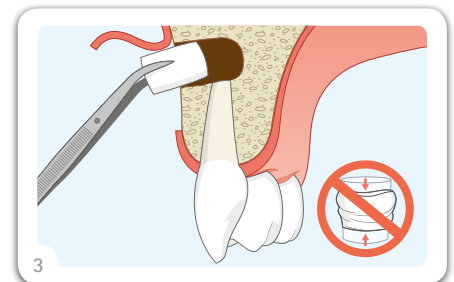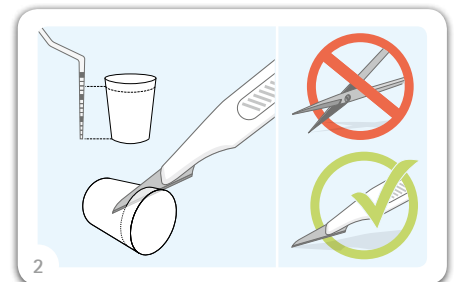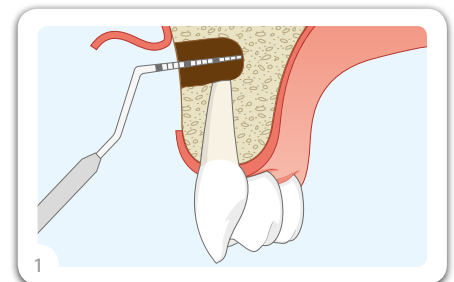

Contenuti e confezioni

PARASORB® HD Cone e GENTA-COLL® HD Cone, in imballo sterile, sono disponibili nelle seguenti confezioni:

| REF | | Conf. |
|---------|---|---------|
| DK-1010 | PARASORB® HD Cone Confezione singola sterile | 10 coni |
| MK10 | GENTA-COLL® HD Cone Confezione singola sterile, con protezione antibiotica | 10 coni |
| MK11 | GENTA-COLL® HD Cone Doppia confezione sterile, con protezione antibiotica | 5 coni |



► Contenuti e confezioni

PARASORB® HD Cone e GENTA-COLL® HD Cone, in imballo sterile, sono disponibili nelle seguenti confezioni:

| REF | | Conf. |
|---------|--|---------|
| DK-1010 | PARASORB® HD Cone Confezione singola sterile | 10 coni |
| MK10 | GENTA-COLL® HD Cone Confezione singola sterile, con protezione antibiotica | 10 coni |
| MK11 | GENTA-COLL® HD Cone Doppia confezione sterile, con protezione antibiotica | 5 coni |



RESORBA Wundversorgung GmbH & Co. KG, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany
Tel. +49 9128 / 91 15 0 Fax +49 9128 / 91 15 91 infomail@resorba.com www.resorba.com

CE 1275

